



Avance[®] Solo

Guide för dig som arbetar
med undertrycksbehandling



Avance® Solo

Innehållsförteckning

- 1. Kontakta oss om Avance Solo**
Representanter på samtliga distrikt samt kundtjänst
- 2. Avance Solo - hur fungerar det?**
Kort summering om systemet
- 3. Supportmaterial på web och för nedladdning**
Guider, posters, hemsida, publikationer, onlineutbildningar och instruktionsvideor
- 4. Steg-för-steg guide för omläggning**
Guide för val av förband, applicering av förband och tips vid användning
- 5. Tips vid användning**
Hur pumpen arbetar, när är det dags att byta förband, vilken typ av batterier etc
- 6. Avance Solo sortiment**
Pumpkit, startkit, förband, sårffyllarskum, Safetacfilm, väskor etc

Vi som arbetar med Avance Solo



Catharina Wretlind

Distriktsansvarig
Stockholm, Gävleborg, Västerbotten,
Norrbotten, Östergötland
Mobil: 073 941 28 76
catharina.wretlind@molnlycke.com



Annika Uhlin

Distriktsansvarig
Femklövern
Mobil: 073-250 65 42
annika.uhlin@molnlycke.com



Therese Henriksson

Distriktsansvarig
VGR, Jönköping,
Blekinge-Kronoberg, Kalmar
Mobil: 073 950 36 27
therese.henriksson@molnlycke.com



Caroline Olofsson

NPWT Affärsutveckling Sverige
Mobil: 073 773 38 63
caroline.olofsson@molnlycke.com



Erika Westerlund

Distriktsansvarig
Stockholm, Västernorrland,
Jämtland-Härjedalen, Gotland, Åland
Mobil: 073 773 37 93
erika.westerlund@molnlycke.com



Sofia Ödman

Distriktsansvarig
VGR, Värmland, Halland, Skåne
Mobil: 0737 73 39 75
sofia.odman@molnlycke.com

Information och utbildning. Hör gärna av dig för att boka en genomgång av systemet

Beställningar. Du hittar Avance Solo sortiment via er interna varuförsörjning.
Vid övriga frågor och problem kan ni även kontakta Mölnlyckes kundtjänst:
csc.se@molnlycke.com, Telefon: 020-79 82 64

Vid frågor till remitterande klinik, kontakta:

Avance® Solo

Guide för dig som arbetar med undertryck

Hur fungerar undertrycksbehandling?

Avance® Solo är en liten, kraftfull engångspump med en kombination av absorberande förband och utbytbar behållare. Systemet kan användas till både operationssnitt och öppna sår och har visat sig ge fina behandlingsresultat¹.

Systemet bidrar till kompression över snittet/såret, vilket motverkar ödem och bidrar till god perfusion. Vid operationssnitt minskas dragspänningen i snittet vilket ger lugnare läkning och minskar risken för ruptur².

Kombination av reglerat tryck på -125mmHg, kontrollerad vätskehantering med absorberande förband och utbytbar behållare ger även bättre förutsättning för ostörd sårsläkning då terapin bibehålls och förbandet kan sitta kvar i upp till 7 dagar³.

Funktioner och fördelar¹:

Användarvänlig	Batteridrivna lita pump med 14 dagars behandlingstid
Reglerat undertryck	-125mmHg via reglerat luftflöde
Förbandssortiment	Borderförband eller traditionellt set med film och skum
Safetac® silikon	Dokumenterat skonsam silikon på filmer/förband
Behållare 50ml	Minskar behov av förbandsbyte
Vätskehantering	2 komponenter; förband och behållare
Säkerhet	Ljus/ljud alarm vid störningar
Placering port	Valfri placering på eller utanför såret

Supportmaterial

Skanna QR-kod för att ladda ner material

- Broschyr Avance Solo, funktion och fördelar (A4)
- Pocket guide för vårdgivare (A5)
- Patient guide (A5)
- Avance Solo A3 poster



Supportmaterial

Var kan jag lära mig snabbt hur Avance Solo fungerar?

Länk till hemsidan för vårdgivare eller skanna QR-kod:
www.avancesolo.se



Hemsida
www.avancesolo.se

Kort introduktionsfilm:

<https://youtu.be/kqXsxe7SpOo>



Introduktionsfilm

Avance® Solo

Steg-för-steg omläggningssguide

- Lämplig förbandsstorlek – incision.** Välj ett förband med ca 1,5 cm förbandsdyna utanför incisionen¹.
- Lämplig förbandsstorlek – öppet sår.** Vid lågt vätskande sår kan sårets storlek uppgå till max 50% av förbandsdynans storlek. Vid måttligt vätskande sår kan sårets storlek uppgå till max 25% av förbandsdynans storlek³.
- Rengör och torka torrt.** Rengör huden runt incisionen/såret, torka torrt¹. Koksalt alternativt alkohollösning rekommenderas för att avlägsna fett och krämer⁴.
- Sårfillarskum.** Vid sårkavitet rekommenderas sårfillarskum som klipps till lämplig storlek¹. Vid användning av skum rekommenderas förbandsbyte mera frekvent enligt vårdgivarens guidelines. Överväg ett icke vidhäftande sårkontaktlager som Mepitel för att skydda ömtålig vävnad som blottad sena eller ben.
- Förbandets port.** Förbandsporten kan placeras med valfri riktning och oberoende av var såret är beläget. Porten kan placeras över såret eller utanför. Fokus bör vara patientens komfort.
- Skyddsfilm nr1.** Starta med att lyfta av skyddsfilm nr1, antingen helt alternativt 5 - 6 cm vid långa förband¹.
- Applicera förbandet.** Applicera över incisionen/såret – tänk på att inte dra i själva förbandet¹.
- Stryk över förbandsytan.** Lägg ett lätt tryck/stryk över förbandsdyna och kant för optimal vidhäftning av silikonkontaktytan dikt an mot incisionen/såret och huden. Fortsätt sedan långsamt dra av resterande skyddsfilm nr1. Stryk med handen för optimal vidhäftning¹.
- Skyddsfilm nr 2 och 3.** Avlägsna mittersta delen av skyddsfilm nr 2 och stryk ut förbandet. När du närmar dig hörnen, varva med att, från sida till sida långsamt dra bort skyddsfilmen. Stryk efter med finger/tumme så minimeras risken för rynkor i hörnen. Samma process med skyddsfilm nr 3¹.
- Uppstart av pumpen.** Montera batterier enligt anvisning. Kalibrering utav trycksensorer startar, larmikonerna lyser och funktionsljud hörs. Pumpen är nu i pausläge redo att startas. Tips – skriv datum för uppstart på pumpen. Pumpen kommer att notifiera och larma när det är dags att byta batterier¹.
- Koppla ihop förbandet med pumpen**
- Starta pumpen.** Håll in den gröna knappen 2 sekunder, pumpen startar när du släpper knappen. Kontrollera att förbandet sitter tätt och att undertryck etableras i förbandet. Pumpen aktiveras då 2ggr/min¹.
- Applicera alltid fixeringsremсор.** Placera fixeringsremсорna så att de täcker skarv mellan förbandsdyna och förbandskant och över portens förankring. Använd remсор av Avance filmen vid känslig hud. Klipp fixeringsremсорna halvlänga då de skall placeras över en led, applicera omlott för maximal tätning⁵.
- Skydda förbandet med polstring.** Om så önskas.

Avance® Solo

Tips vid användning

Pumpen arbetar under behandling

Pumpen kan låta mer frekvent än 2ggr/min om patienten är rörlig, då arbetar den för att justera tryckförändringar. Så länge förbandet är hårt och vakuum bibehållet fortgår behandlingen¹.

Vanliga frågor kring läckagelarm

Larmikonen för läckage kan blinka utan att larmljud utlösts. Detta kan bero på tryckförändringar pga av rörlig patient, alternativt har mikroläckage uppstått. Patienten kan sitta ned, stryka över förbandet, eventuellt pausa pumpen och starta igen. Så länge pumpen arbetar och förbandet är hårt bibehålls terapin. Vid kombinerat ljud och ljuslarm har läckage uppstått och extra tätning krävs⁶.

Vätska i behållaren

Förbandet är primär källa för vätska/blod, behållaren är en backup. Undertrycksterapin bibehålls oberoende av förbandets mättnadsgrad¹. Förbandet hanterar ibland all vätska och behållaren förblir tom. Håll uppsikt över förbandets mättnadsgrad vid kraftigt viskös/trögflytande vätska om du märker att behållaren inte fylls. Förbandsbyte kan då behövas trots att behållaren inte är fylld.

När bör du byta förband och behållare?

Systemet är inte mättat förrän behållaren är full och pumpen larmar. Förbandet är testat för att kunna sitta kvar i 7 dagar, så länge vakuum är bibehållet och fylld behållare byts. Antal dagar kan variera beroende på sårtyp, anatomisk placering och vätskemängd¹.

Förbandet absorberar även om pumpen slutar fungera

Målet är alltid att försöka upprätthålla undertrycksterapin. Om patienten är hemma och pumpen larmar t ex under helgen eller på natten är rekommendationen för patienten att läsa om felsökning och åtgärder i patientguiden. Avance Solo Borderförband kan användas upp till 7 dagar och absorberar vätska även om pumpen är avstängd och undertrycksterapin förlorats. Om förbandet inte är fullt innebär det att patienten inte behöver söka akutvård utan kan kontakta dig som vårdgivare så snart som möjligt, till exempel nästkommande dag.

Användarmanualer

I varje avdelningsförpackning med pump ligger två buntar med användarmanualer. Om ni önskar läsa i detalj eller vill skicka med patienten extra information utöver patientguide ligger de svenska manualerna som nr 3, där det står NL på framsidan. Ni hittar den svenska på baksidan.


Batterier

Pumpen drivs med lithium batterier, AA 1,5V, 2st i taget (inkluderar 4st). Om pumpen får arbeta extra mycket kan vid enstaka fall 2 extra batterier behövas, pumpen larmar inför batteribyte.

Avance® Solo

Produktsortiment

Art.nr	Avance Solo Pumpset	St/Avd.förp	St/TRP
8880050	Avance Solo pump och behållare	1	2
Art.nr	Avance Solo borderförband	St/Avd.förp	St/TRP
881020	Avance Solo borderförband 10x20 cm	2	4
881030	Avance Solo borderförband 10x30 cm	2	4
881035	Avance Solo borderförband 10x35 cm	2	4
881515	Avance Solo borderförband 15x15 cm	2	4
881520	Avance Solo borderförband 15x20 cm	2	4
881530	Avance Solo borderförband 15x30 cm	2	4
882020	Avance Solo borderförband 20x20 cm	2	4
882525	Avance Solo borderförband 25x25 cm	2	4
Art.nr	Avance Solo startset med pump, behållare, borderförband	St/Avd.förp	St/TRP
8881020	Avance Solo startset, 10 x 20 cm	1	2
8881030	Avance Solo startset, 10 cm x 30 cm	1	2
8881035	Avance Solo startset, 10 cm x 35 cm	1	2
Art.nr	Avance Solo - övriga produkter	St/Avd.förp	St/TRP
880050	Avance Solo behållare 50 ml	4	8
882000	Avance Solo skum 1,5x10x12 cm	4	8
Art.nr	Avance Solo Adapt	St/Avd.förp	St/TRP
9994152	Avance Solo Adapt startset inkl Adapt förbandskit	1	2
994152	Avance Solo Adapt förbandskit	5	5
994000	Avance Solo Adapt film 20 x 27 cm	5	10
Art.nr	Avance Solo tillbehör	St/Avd.förp	St/TRP
890001	Bärväska liten	1	8
890002	Bärväska stor	1	8
890003	Bärväska med ljudisolering	1	2

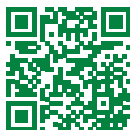

Fullständig tabell med mer detaljerat innehåll finns på
<https://www.avancesolo.se/avance-solo/>

Proving it every day

Mölnlycke® levererar innovativa lösningar för sårbehandling, förbättrad kirurgisk säkerhet och effektivitet samt förebyggande av trycksår. Våra lösningar bidrar till att uppnå bättre resultat och stöds av kliniska och hälsoekonomiska underlag.

Vi har ett övergripande mål för all vår verksamhet: att hjälpa sjukvårdspersonal prestera sitt bästa. Och vi är dedikerade att visa det varje dag.

Referenser:

1. Avance Solo IFU for caregivers. **2.** Davies P. Closed incision negative pressure wound therapy: A literature review and an introduction to Avance® Solo. Wounds International (2022). **3.** Data on file (16). **4.** Avance Solo, Guidance when selecting and applying Avance Solo NPWT dressings (2022) HQIM003345. **5.** Avance Solo, User Guide (2023) SEWC1172311 **6.** Mölnlycke. Avance Solo – Using the system. www.avancesolo.com/using-the-system (2024).

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, P.O. Box 6, Entreprenörstråket 21, SE-431 21 Mölndal, Sverige. Telefon + 46 31 722 30 00.
Varumärkena och logotyperna Mölnlycke, Avance Solo och Safetac är globalt registrerade av ett eller fler företag i Mölnlycke Health Care Group. ©2024 Mölnlycke Health Care. Med ensamrätt. SEWC1192403

